

FastエステTM

1台8役
セルフサービス
専用複合美容器

自分で選べるお手軽エステ セルフエステ・制毛・IW波

美肌

遅れがちなターンオーバー(代謝)を正常化し、くすみを改善する事でお肌の美白を促進します。

制毛

独自二段階照射で痛みや火傷の心配がなく、毛の成長抑制に最適な波長帯に光をコントロールして、バルジだけを狙い撃ちするのでお肌に優しいです。(特許出願中)

特許技術IW波でリフトアップ

IW波(干渉波)が皮膚の最深部にある表情筋を運動させてくれるので、小顔・リフトアップ・二重あごなどの改善に効果的で、即効性わずか5分で驚きの効果を実感。

シワ・たるみ等の改善

光が繊維芽細胞を刺激し、シワ・たるみ改善に効果的なコラーゲン生成を促しお肌のハリを出します。



トリートメント

ポレーションが瞬間的に表皮にすき間を開け、通常お肌に浸透しづらい高分子のコラーゲン・ヒアルロン酸などをお肌の奥まで浸透させることで、効果を引出します。

シミ・そばかす改善

シミ・そばかすの原因のメラニンに強く作用しメラニン生成を抑制。

ニキビ跡改善

ニキビ跡の色素沈着部分にのみ強く代謝促進を促し改善します。

バストアップ

クーパー靭帯はコラーゲンの束で出来ていて、光がコラーゲン生成を促し、ハリを出す事で美しいバスト形成が期待できます。

ご利用手引書

名称紹介

SB CABIN 本体



ハンドピース



SKINカートリッジ
(美肌・バスタップ用)



EPIカートリッジ
(制毛用)



IPプローブ



パイラ リンクジェル



パイラ RFクリーム



ハングランディールプロ



IPプローブ細部用アタッチメント



専用サングラス

制毛用 EPIカートリッジの利用手順

※必ず事前に毛を剃ってきてください。目の上や傷口、タトゥーやその近辺には使用できません。


1 EPIカートリッジを最後まで
しっかり差し込んでください



2 中央のダイヤルボタンを約一秒間押してください
カートリッジ種別を本体が自動的に判別し、差込んだ
カートリッジと同じモードのランプが点灯します



3 中央のレベル調整ダイヤルを回し、お肌の
状態や部位によってレベルを調整してください

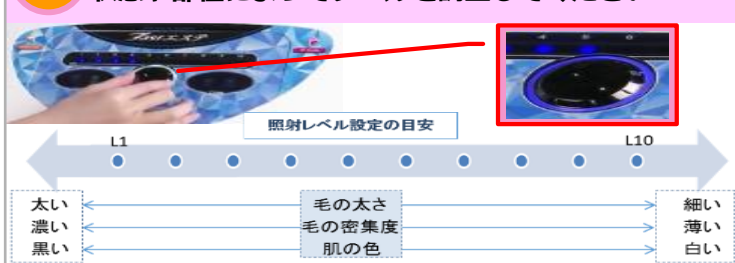

4 レベルを決め中央のボタンを押してください
青く発光したらスタンバイ完了です



5 必ず備え付けのサングラスを
装着してください



6 パイラリンクジェルを直接
カートリッジの上に2プッシュ出します




7 照射部分が熱くなり過ぎないように
ジェルを満遍なく塗っていきます



8 カートリッジを希望箇所のお肌に密着させ
ダイヤル回りが緑色に発光したら、
ハンドピースの照射ボタンを押します



9 制毛後は備え付けのノングランディールプロで
照射部位を保護してください

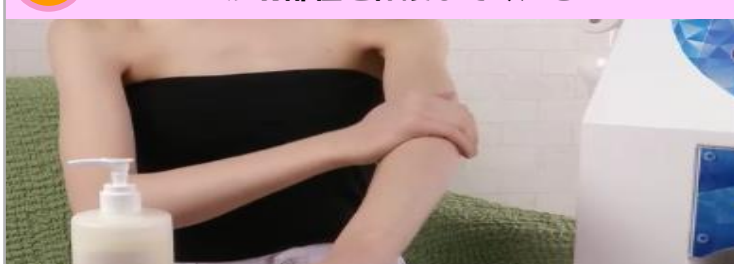

注意事項

- ※ L1から照射して徐々にレベルを上げていき、痛みを感じたレベルから1レベル下げたレベルでスタートして下さい。
- ※照射する際は目を閉じてください。
- ※ワンプッシュでEPIは2回、SKINは5回フラッシュします。
- ※照射中に部位からカートリッジが離れると、上記各フラッシュ回数に満たないでフラッシュがストップします。
- ※制毛後は直射日光をさけ、当日の入浴はシャワーにしてください。
- ※ホクロがある部位の照射を避けてください。

美肌・バストアップ^o用 SKINカートリッジの利用手順

※お顔の場合はPOINTメイク以外をOFFして、使用してください。目の上や傷口、タトゥーやその近辺には使用できません。


1 SKINカートリッジを最後までしっかり差し込んでください



2 中央のダイヤルボタンを約一秒間押してください
カートリッジ^o種別を本体が自動的に判別し、差込んだカートリッジと同じモードのランプが点灯します



3 中央のレベル調整ダイヤルを回し、お肌の状態や部位によってレベルを調整してください

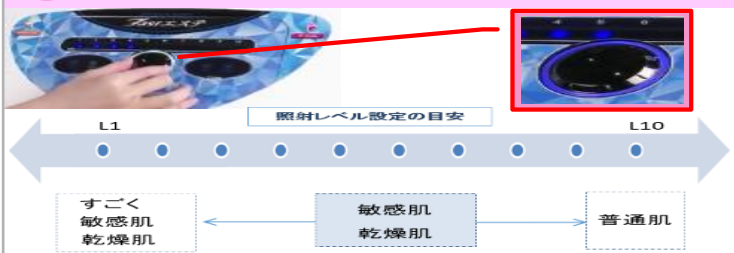

4 レベルを決め中央のボタンを押してください
青く発光したらスタンバイ完了です



5 必ず備え付けのサングラスを装着してください




6 パイラリンクジェルを直接カートリッジの上に2プッシュ出します



7 希望する部位にジェルを満遍なく塗っていきます
(足りない場合は足してください)



8 カートリッジを希望箇所のお肌に密着させダイヤル回りが緑色に発光したら、ハンドピースの照射ボタンを押します

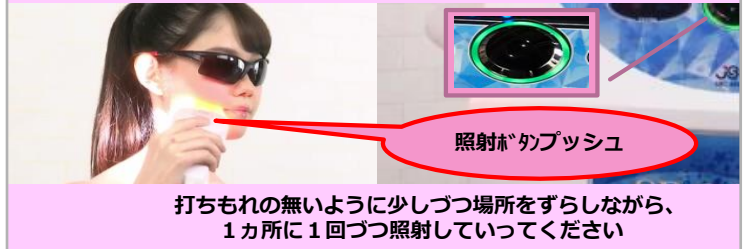

注意事項

※ L1から照射して徐々にレベルを上げていき、痛みを感じたレベルから1レベル下げたレベルでスタートして下さい。

※照射する際は目を閉じてください。

※ワンプッシュでEPIは2回、SKINは5回フラッシュします。

※照射中に部位からカートリッジが離れると、上記各フラッシュ回数に満たないでフラッシュがストップします。

※制毛後は直射日光をさけ、当日の入浴はシャワーにしてください。

※ホクロがある部位の照射を避けてください。

I Pプローブ利用手順

特許 I W波表情筋トレーニング編

1 モード選択ボタンを押して、赤点灯のIW波モードを選択してください



モード選択ボタン

2 パイラリンクジェルを直接 I Pプローブの上に出します



3 I Pプローブの上ののせたジェルを、お顔に伸ばしていきます。



(足りない場合は足してください)

4 お肌にあてて心地よさを感じるレベルに合わせてください。



UP/DOWN
ボタンで調整できます
(8段階調整)

5 お顔の中心から耳の裏へ向かって押し上げるイメージで流してください



(片側5分が目安です)

I Pプローブ利用手順

エレクトロポレーション美容液導入編

1 モード選択ボタンを押して、緑点灯のポレーションモードを選択してください



モード選択ボタン

2 様々な美容成分が配合されているRFクリームを、直接 I Pプローブの上に出します



3 I Pプローブの上ののせたジェルを、お顔に伸ばしていきます。



(足りない場合は足してください)

4 お肌にあてて心地よさを感じるレベルに合わせてください。



UP/DOWN
ボタンで調整できます
(8段階調整)


5 お顔の中心から耳の裏へ向かって押し上げるイメージで流してください



(片側5分が目安です)


トリートメントの流れ

SKINフラッシュ フェイシャル編

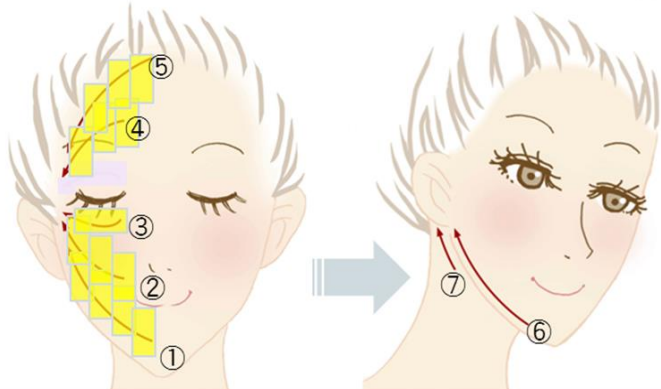


お顔の中心から耳に向かって、打ちもれのないように少しづつ場所をずらしながら当てていき、お顔全体を3周してください。

SKINフラッシュ バストアップ編

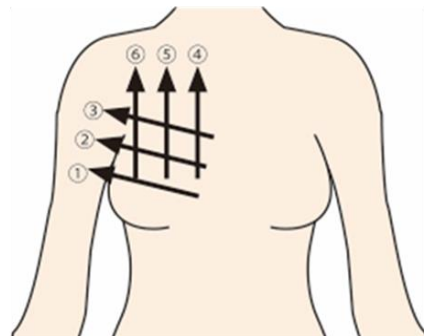

中心から外に向けて照射していきましょう。
バストトップから鎖骨の間をトリートメントしていきます。

I W波・ポレーション フェイシャル編

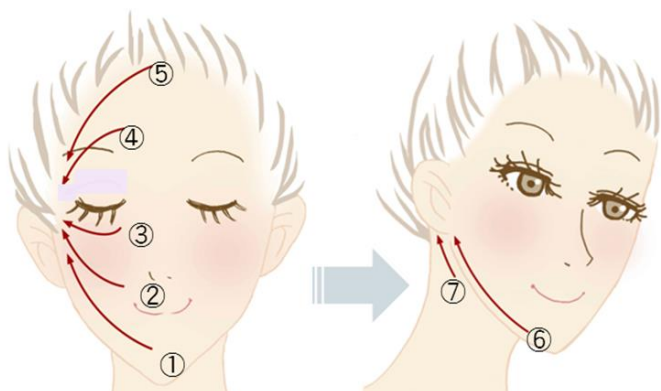

お顔の中心から耳の裏へ向かって流していくイメージをしてください。
耳に向かうときは押し上げるように、戻すときは肌から離さず軽く当てているイメージ。

アタッチメント装着 フェイシャル編



気になる部位を上下したり、細かく円を描きながら当てていきます。